


Informationsbroschüre für den Behandler

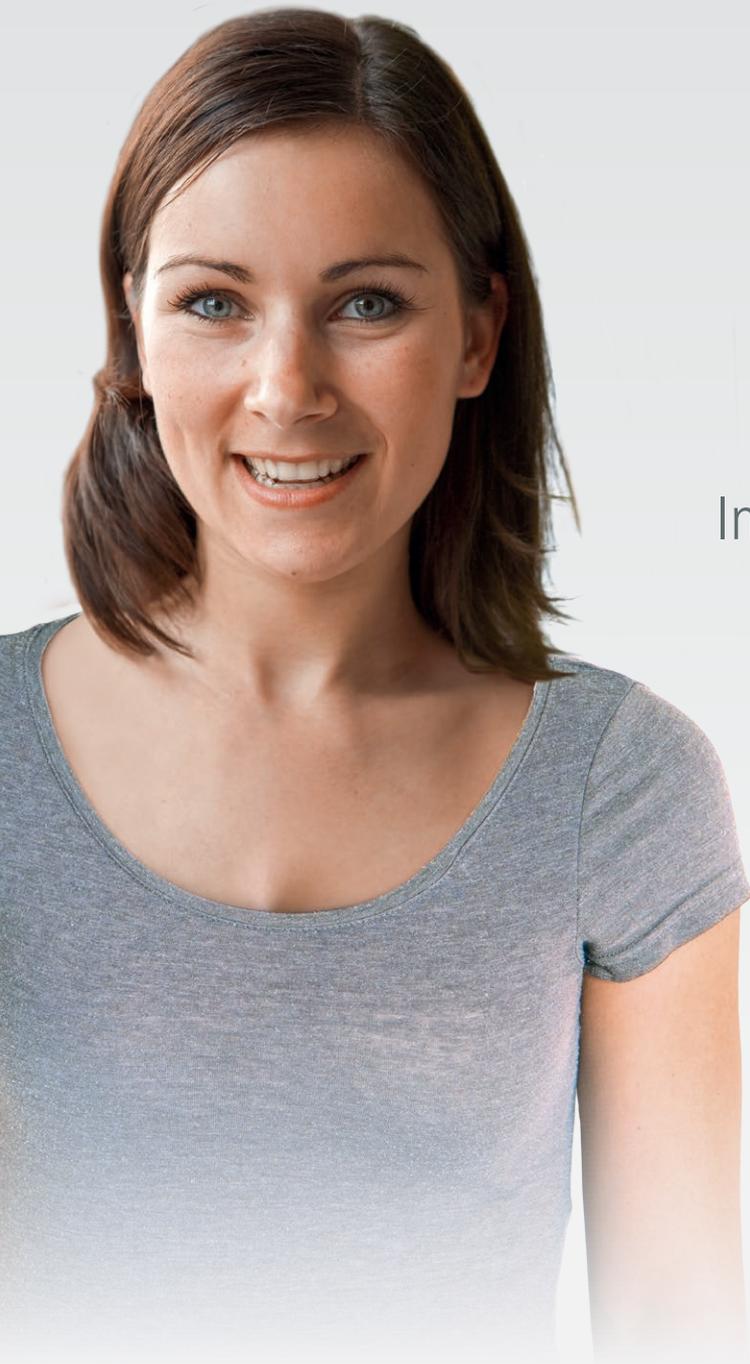

In einfachen Schritten zu einem strahlenden Lächeln

Typische Fehlstellungen wie zu eng stehende Zähne oder Zahnlücken – besonders in der Front – muss heutzutage niemand mehr so einfach hinnehmen.

Mit den transparenten aesthetic liner® Zahnkorrekturschienen können solche Fehlstellungen erfolgreich und optisch diskret behoben werden.

Ein strahlendes Lächeln ist Ihren Patienten gewiss!



Was ist aesthetic liner®?

Zahnkorrekturschienen haben sich bei der Behandlung von erwachsenen Patienten besonders etabliert und stellen bei richtiger Indikation eine sehr effiziente Therapiemöglichkeit dar. Dabei kommen häufig Systeme zum Einsatz, bei denen im Behandlungsverlauf eine Vielzahl von Schienen eingesetzt werden müssen.

Im Gegensatz dazu können Sie mit der transparenten Korrekturschiene aesthetic liner® ein einfaches System nutzen, das in unserer hauseigenen Praxis PD Dr. M. Sander eingehend getestet wurde. Im Normalfall stellt sich mit drei Behandlungsstufen, d. h. 6 Schienen je Kiefer, der Erfolg nach ca. 4 Monaten Tragezeit ein.

aesthetic liner® ist die kostentransparente und effiziente Therapie mit nahezu unsichtbaren Schienen, um klassische Frontzahnfehlstellungen ästhetisch und elegant zu korrigieren. Diese Therapie ist eine interessante Alternative für Patienten, die einen hohen Wert auf Ästhetik während der Behandlung legen.

Herausnehmbare Geräte oder eine Multibandbehandlung empfinden viele Erwachsene als störend und verzichten daher auf eine kieferorthopädische Therapie.

Indikation

Kleinere kieferorthopädische Korrekturen, wie zum Beispiel

- Beseitigung von Engständen
- Behandlung von rotierten Zähnen
- Schließen eines Diastemas



So funktioniert der patientenindividuelle Behandlungsablauf

Einfach für Sie – einfach für Ihre Patienten

AUFTRAGSFORMULAR

Zu den Bedingungen des neuesten Leistungsverzeichnisses

die transparente Zahnkorrekturschiene

Patientenangaben Hier bitte unbedingt das **Patienten-ID-Etikett** aufkleben!

(Dieses Patienten-ID-Etikett dient der eindeutigen Auftragsverfolgung. Sie werden keine weitere Auskunft über Ihre Daten geben. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.)

Name/Vorname Patient: _____ Geschlecht: M W

Geb. _____ Versicherungsstatus: PKV Selbstzahler Beihilfe

Bitte kontaktieren Sie uns zunächst telefonisch. Ansprechpartner (möglichst Name des Behandelnden) _____ Wunschtermin _____

Abdrücke: Modelle: Orthopantomogramm: Modelle bitte: Sockeln Duplizieren Timmen
 OK UK OK UK Wachsbiss in Schlussbissstellung: Auf beiliegenden Modellen arbeiten OK UK

Besonderheiten (z. B. Implantat, Brücke o. ä.)
 Bitte in nebenstehendem Zahnschema markieren:
 Sonstiges: (z. B. Zungenfunktion) _____

Schienenauftrag aesthetic liner® (double action)
 Um Zähne in die optimale Stellung zu korrigieren, ist es ggf. nötig approximal zu strippen, in diesem Fall bitte:

Die optimale Zahnstellungskorrektur und Empfehlung für etwaige Strippsmaßnahmen wird der Laborleitung anvertraut

nicht strippen
 strippen wie in der ASR-Empfehlung angegeben

Zusätzlich diagnostisches Ziel-Setup (40,- € je Kiefer/Kosten werden im Auftragsfall verrechnet)

Wir bitten vor der Gerätebeauftragung um eine Vorabberatung (kostenlos)

Unsere Empfehlung: ASR Stripping-Tools

Anzahl EinPatientenSet (4 Tools: 15 µm, 25 µm, 40 µm, 60 µm)
 Edeltstahlhalter double
 Messlehre (5 Stärken: 0,1 – 0,5 mm)

Besondere Korrekturwünsche

Angulation: (bitte Richtung nebenstehend einzeichnen) Rotationen o. a.: (bitte Richtung nebenstehend einzeichnen)

Sonstige Detailangaben: _____

Andere Zusatzausstattungen, wie folgt: _____

Bitte senden Sie mir weitere Unterlagen: aesthetic liner® Auftragsformulare Patientenfilyer

Folgen Sie aesthetic liner® auf facebook

www.aesthetic-liner.de – info@aesthetic-liner.de

Die aesthetic-liner® Speziallabore:
 Frankfurt am Main Fachlabor Dr. W. Klee GmbH, Viboler Landstraße 3-5, 60386 Frankfurt/M., Germany, Tel. +49 69 94221-0, Fax +49 69 94221-201
 Hamburg Labor Dr. F. W. Seibach GmbH & Co. KG, Beumering 9, 21077 Hamburg, Germany, Tel. +49 40 761044-0, Fax +49 40 7610711
 Potsdam Fachlabor Dr. W. Klee GmbH, Potsdamer Straße 176, 14469 Potsdam, Germany, Tel. +49 331 55070-0, Fax +49 331 55070-21

aesthetic liner® Auftragsformular

1. Beratung Ihres Patienten und Herstellung der Modelle

Sie besprechen mit Ihrem Patienten die Situation und persönlichen Wünsche. Danach nehmen Sie Abdrücke und erstellen Modelle. Diese werden mit den Unterlagen Ihres Patienten **und** unserem Auftragsformular für aesthetic liner® an unser Labor geschickt.

Mit dem Auftragsformular aesthetic liner® können Sie einen Schienenauftrag auslösen oder eine schriftliche, kostenlose Vorabberatung – inkl. der genauen Gerätekosten - anfordern. Bei Bedarf können Sie zusätzlich ein kostenpflichtiges Ziel-Setup beauftragen, dessen Kosten wir bei Gerätebeauftragung verrechnen.

2. Vorabberatung

Unser Hauptanliegen sehen wir in der optimalen **Beratung und Betreuung**, deshalb ist uns die qualifizierte und ehrliche Beratung Ihres jeweiligen Patientenfalls wichtig.

Nach Eingang Ihrer Unterlagen und Abdrücke wird Ihr Fall von unseren technischen Beratern evaluiert. Sie erhalten von uns eine individuelle Vorabberatung. Diese enthält ebenfalls Angaben zu Behandlungsdauer, Kosten sowie Anzahl der Behandlungsstufen. Falls wir der Meinung sind dass eine andere Therapie geeigneter wäre, beraten wir Sie selbstverständlich diesbezüglich. Mit dem beiliegenden Antwortformular haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, uns mit der Erstellung eines kostenpflichtigen Selbstzahlerplans zu beauftragen.

3. Schienenherstellung

Sobald sich Ihr Patient für eine Therapie entschieden hat, senden Sie bitte das der Vorabberatung beigefügte Antwortformular an uns zurück. Je Abdruck werden bis zu drei Setup-Schritte laborseits aufgestellt und je Setup-Schritt werden zwei aesthetic liner® Schienen hergestellt.

In den meisten Fällen wird ein ideales Behandlungsergebnis in drei Setup-Schritten erreicht. Für einen solchen „klassischen Fall“ erhalten Sie dann mit Einsendung des Abdrucks **3 Schienenpaare je Kiefer**.



Setup mit aesthetic liner® Schiene

4. Behandlungsstart

Eine Sequenz von aufeinander abgestimmten Schienenpaaren führt zum gewünschten Behandlungserfolg. Bei der nächsten Einbestellung Ihres Patienten setzen Sie die erste Schiene ein. Die jeweils erste hart-wei- che Schiene eines jeden Schienenpaares ist der Erfolgsschlüssel für den einzelnen Behandlungsschritt. Sie wird für ca. 3 – 4 Wochen getragen. Die jeweils folgende zweite harte Schiene konsolidiert den angestrebten Behandlungsschritt. Diese wird für ca. 2 Wochen getragen.



EinPatientenSet

Ggf. ist aufgrund Platz- mangels eine **Approxi- male Schmelzreduktion** (Strippen) erforderlich. Sie erhalten mit Lieferung der Schienen eine entspre- chende ASR-Empfehlung. Mit dieser Empfehlung erhalten Sie Hinweise über die optimale Schmelz- reduktion während der Behandlungsstufen.



**Fachlabor
Dr. W. Klee**
für graze Kieferorthopädie




Platzbedarf Empfehlung (ASR)


Behandler: Felix Klee
Patient: Christl Otho, *
Auftragsnummer: 21421225
Datum: 04.07.2014
Behandlungsstatus: Sequenz 1

Für den Patienten wurden im OK 3 Behandlungsstufen und im UK 5 Behandlungsstufen geplant. Sie erhalten die Schienen für die letzten OK Behandlungsstufen 1, 2 und 3. Zudem erhalten Sie die Schienen für die ersten UK Behandlungsstufen 1, 2 und 3.
Platzbedarf für die vorliegenden Behandlungsstufen: OK 0,87 mm und UK 0,71 mm


1. Behandlungsstufe

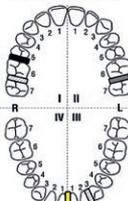

2. Behandlungsstufe

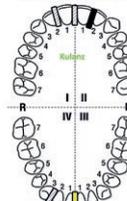

3. Behandlungsstufe

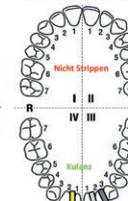

Info: In der Übersicht erhalten Sie Hinweise, wie viel ASR (Approximale Schmelzreduktion) wir während der Behandlungsstufen vorschlagen. Die angegebenen Farben (Erklärung siehe unten) markieren die verschiedenen Stärken der Stripping-Tools.

Hinweis: Die von uns empfohlenen Stripping-Tools sind beidseitig diamantiert. Sie sind staublöslich und können während der Gesamtbehandlung des Patienten benutzt werden.

Zu beachten: Pro Sequenz wird ein neuer Abdruck benötigt. Jede Sequenz besteht aus maximal 3 Behandlungsstufen.

Stripping-Tools (gemäß aesthetic liner® EinPatientenSet)

0,08 mm 0,10 mm 0,13 mm 0,17 mm

Maschine (z.B. Disk) bevorzugt

0,20 mm

www.aesthetic-liner.de – info@aesthetic-liner.de

Die aesthetic liner®-Speziallabore:
 Frankfurt: Fachlabor Dr. W. Klee GmbH, Wilhelms-Landstraße 3, 60386 Frankfurt am Main, Germany, Telefon + 49 89 9 42 21 0, Fax +49 89 9 42 21 201
 München: Fachlabor Dr. W. Klee GmbH, Rosenauer Straße 17b, 81469 München, Germany, Telefon + 49 89 3 53 20 70-0, Fax + 49 89 3 53 20 70-23
 Hamburg: Labor Dr. F. W. Selbach GmbH & Co. KG, Beckenring 5, 21077 Hamburg, Germany, Telefon + 49 40 746044-0, Fax +49 40 7460711

ASR-Empfehlung

5. Erreichen des Behandlungsziels

Bestellen Sie Ihren Patienten nach jeder Schienensequenz ein, um die Zwischenschritte zu kontrollieren. Die Dauer der Behandlung hängt von der Zahnfehlstellung ab. Die klassischen Fälle lassen sich mit **drei**




Behandlungsstufen, d. h. mit insgesamt sechs Schienen je Kiefer behandeln. Die Behandlungszeit entspricht bei einem klassischen Fall mit ca. 2,5 mm Zahn- bewegung ca. 15 - 16 Wochen.

Wird für die angestrebte Korrektur z. B. ein 4-ter, 5-ter oder gar 6-ter Schritt benötigt, so senden Sie uns einfach nach Abschluss des dritten Behandlungsschritts neue Abdrücke. Der Prozess beginnt dann von vorne.

Schiene 1 wird für ca. 3-4 Wochen getragen. Schiene 2 wird für ca. 2 Wochen getragen.

Zum Erreichen des Behandlungsziel sollten die Schienen möglichst rund um die Uhr getragen und nur zum Essen, beim Spielen bestimmter Musikinstrumente, bei Kontaktsportarten und zur Zahnhygiene entfernt werden.

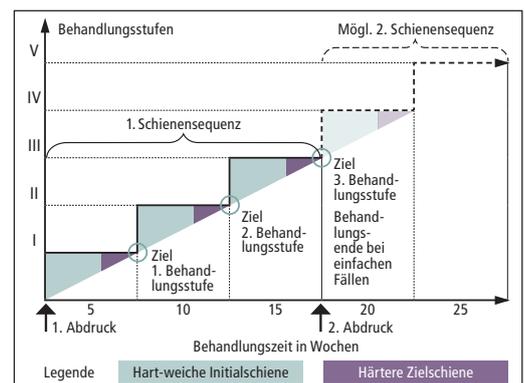


6. Retention

Wie nach jeder kieferorthopädischen Behandlung muss auch nach einer Behandlung mit Schienen eine Stabilisierung des Kausystems erfolgen. Dazu kann die letzte Schiene nachts weitergetragen werden. Empfehlenswert ist ein 3-3-Retainer sowohl im Unterkiefer, als auch im Oberkiefer. Sicherheitshalber sollte der Patient über den Retainer noch einmal eine passive Retentionsschiene bekommen, so dass keine Panik entstehen muss, sollte sich im Urlaub der Retainer lösen.



Multiflex VIII

Behandlungsablauf mit aesthetic liner®

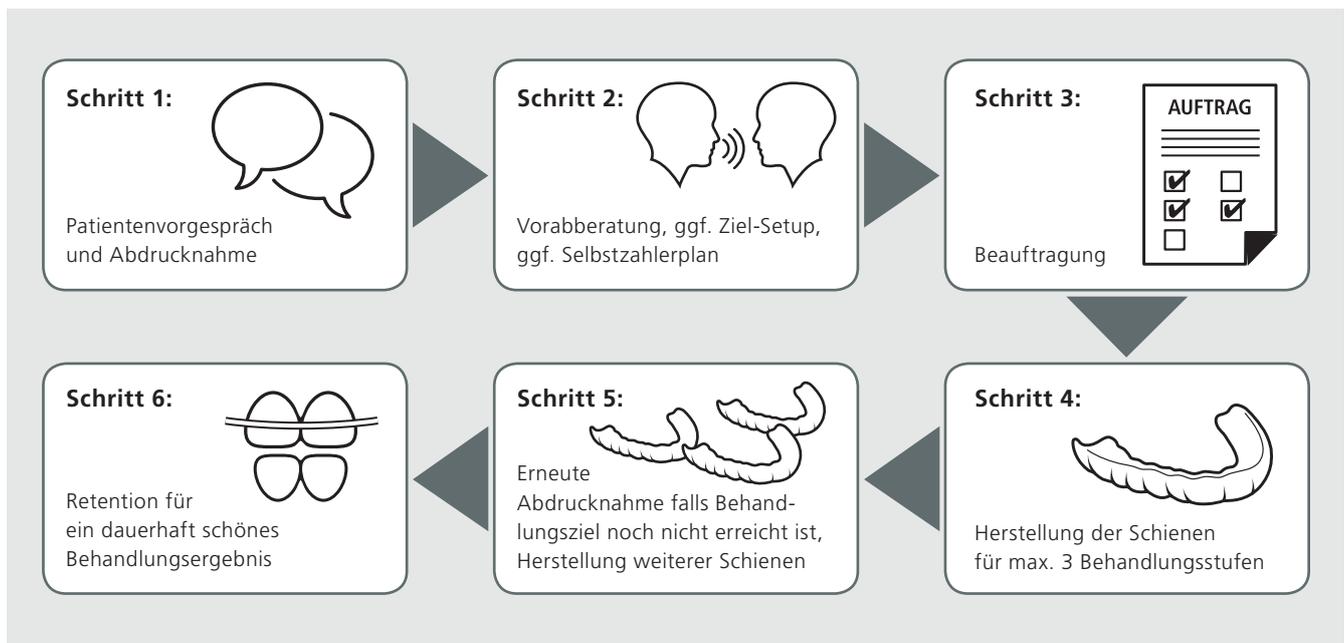

aesthetic liner® vereint viele Vorteile – für Sie als Behandler

- Fachlich und qualifizierte Beratung durch unsere kompetenten Mitarbeiter
- Kein Startinstrumentarium für die Behandlung nötig
- Transparente Kostenkalkulation – Setup-Schritte und Schienen werden patientenindividuell berechnet
- Es fallen keine Fall- oder Lizenzgebühren an
- Schmerzfreie bzw. schmerzarme Behandlung aufgrund sehr guter biomechanischer Eigenschaften durch Start mit hart-weicher Schiene, die die Auslenkung bei der Erstbewegung „puffert“

aesthetic liner® vereint viele Vorteile – für Ihre Patienten

- Schmerzfreie bzw. schmerzarme Behandlung
- Durch das Zwei-Schienen-System (double action) mit harter Zielschiene Reduktion der Zwischenschritte, damit insgesamt weniger Schienen und Kosten
- Bereits nach der ersten Behandlungsstufe sind erste Erfolge sichtbar
- Unauffällig und diskret durch volltransparente Schienen
- Hoher Tragekomfort durch passgenaue Fertigung der Schienen
- Einfaches Einsetzen und Herausnehmen der Schienen
- Leichte Mundpflege
- Metallfrei – auch für Allergiker bestens geeignet

Das bedeutet: hohe Behandlungssicherheit, hohe Behandlungsabschlussquote, zufriedene Patienten und ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

„Die aesthetic liner®-Schiene ist einfach super, weil sie leicht einzusetzen und ganz bequem zu tragen ist! Ich sehe jetzt schon, wie meine Zähne schöner werden. Und lachen bereitet mir jetzt besonders viel Freude.“



Unser zusätzlicher Service für Sie

Die Behandlung mit der aesthetic liner® Schiene ist ganz einfach.

1. Unsere aesthetic liner-Schienen® werden in einer praktischen Faltschachtel ausgeliefert. Damit es beim Einsetzen garantiert nicht zu Verwechslungen kommt, sind alle Schienen gekennzeichnet, nummeriert und liegen in der richtigen Reihenfolge in der Faltschachtel.
2. Die Trageanleitung für den Patienten liegt ebenfalls bei und wird ihm nach dem Einsetzen der ersten Schiene mitgegeben.
3. Die ASR-Empfehlung ist übersichtlich und gibt Ihnen als Behandler die richtige Anleitung in jeder Behandlungsstufe, in der Sie strippen müssen. Das gibt Ihnen Sicherheit und sorgt für perfekte Platzverhältnisse während der Gesamtdauer der Behandlung.
4. Die für die Behandlung benötigten Stripping-Tools können Sie direkt bei uns bestellen.
5. Für ein dauerhaft schönes Behandlungsergebnis empfehlen wir für die Retention einen 3-3 Retainer. Eine Anleitung zum Kleben des Retainers erhalten Sie ebenfalls von uns.
6. Wir stellen Ihnen gern auf Anfrage Informationsmaterial für Ihre Patienten zur Verfügung.
7. Nutzen Sie unseren 20 % Gutschein für sich selbst oder eine(n) Mitarbeiter(in) Ihrer Praxis. Wir gewähren Ihnen einmalig 20 % Rabatt auf die Laborkosten bei einer Behandlung mit aesthetic liner®.

Und falls dennoch Fragen auftauchen, stehen Ihnen unsere technischen Fachberater gern zur Verfügung.



Trageanleitung, Faltschachtel und Gutschein

Wir unterstützen Sie nicht nur von Beginn bis Ende der Behandlung, wir stellen Ihnen auf Anfrage auch Informationsmaterial für Ihre Patienten zur Verfügung. Fast schon ein Klassiker sind unsere aesthetic liner® Webinare. Im Rahmen der einstündigen, kostenlosen und interaktiven Live-Vorträge im Internet erfahren Sie z. B. welche Fälle mit den transparenten Schienen behandelt werden können.

Typisches Behandlungsbeispiel für aesthetic liner®

Für einfache bis mittelschwere Frontzahnkorrekturen wie in diesem Fall, eignet sich aesthetic liner® hervorragend.

Die Abbildungen zeigen eine Patientin, für die Multiband nicht in Frage kam und die eine ästhetisch anspruchsvolle Versorgung wünschte.



Abb. 1: Ausgangssituation



Abb. 4: Abschlussituation



Abb. 2: Ausgangssituation OK Okklusalansicht



Abb. 5: Abschlussituation OK Okklusalansicht



Abb. 3: Ausgangssituation UK Okklusalansicht



Abb. 6: Abschlussituation UK Okklusalansicht

Die aesthetic liner®-Speziallabore:

Frankfurt am Main

Fachlabor Dr. W. Klee GmbH
Vilbeler Landstraße 3-5
60386 Frankfurt, Germany
Telefon +49 69 94221-0
Telefax +49 69 94221-201

Potsdam

Fachlabor Dr. W. Klee GmbH
Potsdamer Straße 176
14469 Potsdam, Germany
Telefon +49 331 55070-0
Telefax +49 331 55070-21

Hamburg

Labor Dr. F. W. Selbach GmbH & Co. KG
Beutnerring 9
21077 Hamburg, Germany
Telefon +49 40 761044-0
Telefax +49 40 7606711

www.aesthetic-liner.de
info@aesthetic-liner.de

